

FICHA TECNICA

BIO-TAPABOCAS 9095 Nacional



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Descripción: El respirador 9095 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso. Hecho en Colombia

Nombre: Respirador de alta eficiencia

Referencia: 9095

Características: Eficacia de filtración bacteriana BFE \geq 95%
Eficacia de filtración de partículas PFE \geq 95%

Color: negro

Capas: con clip nasal, de 5 capas con 2 Filtros antilíquido selladas con ultrasonido

Uso: 1 solo uso de máximo 8 horas

Almacenar temperatura ambiente, en un lugar ventilado, limpio y seco, con humedad relativa no mayor al 80%. Alejar del calor o luz interna.



APLICACIONES Y USOS

Respirador para uso diario en espacios abiertos o cerrados, entornos sanitarios, para personal de la salud y pacientes. Contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite.

Apto para uso medico.

DISEÑO

Capa	Material	Composición
Externa	Politex	Polipropileno 100% Tela no tejida
Filtro	Poliéster	Poliéster 100%
Filtro	Poliéster	Poliéster 100%
Intermedia	Politex	Polipropileno 100% Tela no tejida
Interna	Politex	Polipropileno 100% Tela no tejida

Presentación: Caja x 25 unidades cada unidad sellada y empacada individualmente.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Sostenga el respirador 9095 en la mano con la parte externa apoyada en la palma, permitiendo que las bandas para la cabeza cuelguen debajo de la mano.
2. Coloque el respirador 9095 debajo del mentón y contra el puente de la nariz (el clip nasal hacia arriba). Ubique el elástico superior en la corona de su cabeza y el elástico inferior en la nuca.
3. Con las dos manos, ajuste el clip nasal a la forma de la nariz y las mejillas.
4. Verificación de ajuste: Coloque las dos manos sobre el respirador e inhale con fuerza (tenga cuidado de no alterar la posición del respirador) se debe sentir una presión negativa, si no es así, o si hay fugas de aire alrededor de los bordes del respirador, vuelva a colocarlo, ajuste las bandas a la cabeza y los bordes al rostro. Un mal ajuste reduce la eficacia del respirador.



<https://Desseguridad.net/epp>

Línea BIOTIS Una Marca TechnInnSoft SAS
contacto@desseguridad.net - Tel: +57 300 519 2319