

FICHA TECNICA

BIO-TAPABOCAS TELA LAVABLE ANTIFLUIDO



CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

DESCRIPCIÓN: Productos de uso comunitario elaborados en sus capas internas y externas, en material que brinda resistencia al paso de partículas, con buena repelencia a aspersión de líquidos (Denominados antifluído), compuestos en su totalidad por su filtro interior de poliéster (Tela no tejida, hipoalergénica, impermeable, antiestática, no tóxica, repelente a fluidos, resistencia estándar a rasgado, no estéril, respirable).

Mejor adaptación al cuerpo: con bandas de ajuste elásticas Tejido a las orejas con excelente soporte nasal.

Material Capa externa: Tela antifluído 58% polipropileno 42% polietileno. Calibre 65g/m

Elemento Filtrante: Tela de 50% Poliéster 50% Algodón

Almacenamiento: Lugar limpio, fresco y libre de contaminación. No almacenar cerca de fuentes de calor, ni de olor

Color: negro

Uso: personal hasta 10 usos y 9 lavadas



APLICACIONES Y USOS

Usado para protección general, cumple una función de barrera microbiana reduciendo el paso de fluidos Corporales al exterior, protege el riesgo de exposición a partículas suspendidas en el aire.

DISEÑO

Medida de la máscara: Versión infantil y adulto

Unidad de empaque: Cada unidad sellada y empacada individualmente

INSTRUCCIONES DE USO

1. Antes de ponerse la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante o con agua y jabón.
2. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no haya espacios entre su cara y el material.
3. Evite tocar la mascarilla mientras la usa; si lo hace, lávese las manos con agua y jabón.
4. Para quitársela: desde atrás (no toque la parte delantera de la mascarilla); e inmediatamente lávela con agua y jabón de manos y deje secar a la sombra. Repita este procedimiento por un máximo de 10 ocasiones.
5. Luego de la novena lavada, deséchelo inmediatamente en un recipiente cerrado; y lávese las manos

<https://Desseguridad.net/epp>

Línea BIOTIS Una Marca TechnInnSoft SAS

contacto@desseguridad.net - Tel: +57 300 519 2319

FICHA TECNICA

BIO-TAPABOCAS TELA LAVABLE ANTIFLUIDO



INDICACIONES PARA EL USO DE LA MASCARILLA DE USO NO HOSPITALARIO

La población general debe usar el tapabocas convencional de manera obligatoria en los siguientes lugares y en las siguientes condiciones:

1. En el sistema de transporte público (buses, Transmilenio, taxis) y áreas donde haya afluencia masiva de personas (plazas de mercado, supermercados, bancos, farmacias, entre otros) donde no sea posible mantener la distancia mínima de 1 metro.
2. Aquellas personas que presentan sintomatología respiratoria.
3. Aquellas personas que hacen parte de los grupos de riesgo (personas adultas mayores de 70 años, personas con enfermedades cardiovasculares, enfermedades que comprometan su sistema inmunológico, cáncer, VIH, gestantes y enfermedades respiratorias crónicas).